

Neu

(R)EVOLUTION



1922

2005

- einfach
- zuverlässig
- schön



BerliPen® areo

Die Bedienung
Kurz und übersichtlich

Qualität aus Metall

Made in Germany

Die richtige Dosis – sicher und einfach



Mit dem **BerliPen® areo** bietet Ihnen **BERLIN-CHEMIE** ein neues Präzisionsgerät, das speziell für die 3-ml-Insulinpatronen von **BERLIN-CHEMIE** entwickelt wurde. Der **BerliPen® areo** ist einfach in der Handhabung, präzise beim Dosieren und zuverlässig beim Injizieren. Dank der besonderen Kanülen ist die Injektion kaum zu spüren.



Die Sicherheits- kappe

Sitzt fest, damit sie sich nicht versehentlich öffnet



Die BerliFine®- Kanüle mit Schutzkappe

Durch ihren besonderen Schliff ist die Kanüle kaum spürbar.



Der Patronenhalter

An seiner Skala können Sie ablesen, wieviel Insulin noch zur Verfügung steht.



Die Insulinpatrone

Achten Sie darauf, dass Sie die Patrone richtig herum einsetzen. Bitte verwenden Sie ausschließlich Insulinpatronen der Berlin-Chemie AG!



Die Kolbenstange

Die Kolbenstange drückt das Insulin heraus.



Der Dosierknopf

Dient zum sicheren Dosieren durch exaktes Einrasten und deutliches Klicken.* Dosiskorrektur durch einfaches Zurückdrehen.

* Beim **BerliPen® areo** können sie jede beliebige Insulindosis in **1er-Schritten** bis **60 Einheiten** einstellen.

BerliPen® areo

- **Einfach:**
Selbsterklärende Bedienung
- **Zuverlässig:**
Stabile Mechanik im Metallgehäuse
- **Schön:**
Elegantes Design

Große, gut lesbare Dosiszahlen (3,4mm)

Sichere Dosierung von 1–60 Einheiten in 1er-Schritten durch exaktes und hörbares Einrasten.

Dosiskorrektur durch einfaches Zurückdrehen des Dosierknopfes



Sicherheits-Clip aus Edelstahl

Sicherheitskappe schließt fest und zuverlässig

Robustes Metall-Gehäuse

Kurzer Pen in elegantem Design (14,8 cm)

Geringer Kraftaufwand beim Injizieren



Injektion vorbereiten

Wählen Sie eine Insulindosis durch Drehen des Dosierknopfes vor.

Wenn Sie die Dosis gewählt haben, muss die gewünschte Einheitenzahl im Sichtfenster unter dem Dosierknopf stehen.

Sollten sie irrtümlich eine zu hohe Dosis eingestellt haben, können Sie den Dosierknopf einfach zurückdrehen und die gewünschte Dosis einstellen.



Mischen

Bei trüben Insulinen muss der Inhalt der Insulinpatrone vor dem Spritzen richtig durchgemischt werden.

Dazu schwenken Sie den **BerliPen® areo** mindestens 10-mal gleichmäßig auf und ab und rollen ihn 10-mal zwischen den Händen. Dabei sollte die Sicherheitskappe noch aufgesteckt bleiben.

Pen zur Injektion mit Insulinpatronen der BERLIN-CHEMIE AG
Bei Verwendung von Insulinpatronen anderer Anbieter wird keinerlei Haftung für die Sicherheit, Dosiergenauigkeit und Funktionsfähigkeit sowie etwaige Schäden übernommen.



Injektion auslösen

Wenden Sie die Injektionstechnik so an, wie es Ihnen vom Fachpersonal gezeigt wurde.

Nach dem Einstechen der Kanüle unter die Haut, drücken Sie den Startknopf langsam vollständig durch.

Um das Rückfließen von Insulin aus der Einstichstelle zu vermeiden, sollten Sie zehn Sekunden warten und erst dann die Kanüle aus der Haut ziehen.



Vollständige Dosisabgabe

Vergewissern Sie sich, dass nach der Injektion auf der Dosisanzeige „0“ angezeigt wird.

Jetzt nur noch die Sicherheitskappe aufstecken und den **BerliPen® areo** bis zur nächsten Injektion sicher verwahren.

Übrigens:

Die richtigen Nadeln für Ihren **BerliPen® areo** bekommen Sie bei Ihrem Apotheker. Sie heißen **BerliFine®**-Kanülen.