

# Optimierter Teststreifen – neue Handhabung



GlucoMen Gm® Sensor Teststreifen  
PZN 5883984 geeignet für  
das Blutzuckermessgerät GlucoMen® Gm

→ veränderter Teststreifen ab LOT 50390



Anwendung:

**Bitte beachten Sie, dass sich durch den veränderten Sensoraufbau die Handhabung leicht geändert hat.**


1. Führen Sie den Teststreifen in das Gerät ein.
2. Das Gerät schaltet sich ein.
3. **Neu:**  
**Halten Sie den Teststreifen mit der schmalen Kante an den Blutstropfen.**  
Streifen Sie den Blutstropfen nicht an dem Teststreifen ab.
4. Das Blut wird automatisch eingesaugt.
5. Der Countdown der Blutzuckermessung beginnt.
6. Nach 7 Sekunden erscheint Ihr Blutzuckerwert auf dem Display.



Nachfolgend finden Sie die Änderungen im Detail

Neue Teststreifentechnologie:

- Durch eine Veränderung im Aufbau des Teststreifens wird das Blut leichter in den Streifen eingezogen.
- Das Messprinzip und die Messdauer bleiben unverändert.
- Halten Sie den Teststreifen direkt an den Blutstropfen.

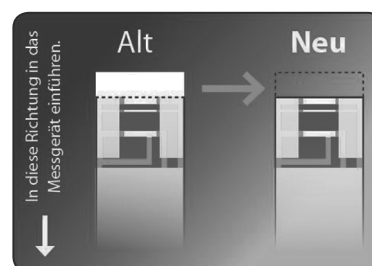

Ihr Vorteil:

**Optimierter + schnellerer Bluteinzug**